

Visomat Tensiometro Digital Comfort 20-40

Tensiómetro digital de brazo completamente automático.

Calificación: Sin calificación

35,00 €

6,07 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ROCHE](#)

Descripción

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO COMFORT CON ADAPTADOR DE CORRIENTE - 20/40 CM

Los tensiómetros Visomat® incluyen la clasificación de los valores de la tensión arterial propuestos por la OMS, la Organización Mundial de Salud.

- Medida de la sistólica, diastólica, pulso y presión del pulso.
- Gran pantalla.
- Control de arritmias.
- Completamente automático, con inflado del manguito hasta el nivel necesario por el método fuzzy logic.
- La medición de la tensión se inicia durante el proceso de inflado, por lo que es más corta.
- El manguito Visomat es universal, indicado para circunferencias de brazo de 23 a 43 cm y de muñeca 12,5 a 21,5.
- Validado clínicamente por la ESH..

MODO DE EMPLEO

Condiciones del paciente:

- Evitar ejercicio físico previo
- Reposo durante 5 minutos antes de la medida
- Posición adecuada (evitar actividad muscular isométrica): sedestación, espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla y brazos apoyados a la altura del corazón, piernas no cruzadas
- Evitar medir en casos de disconfort, vejiga llena, etc.
- Ambiente tranquilo y confortable. Relajación previa a la medición:
- Reducir la ansiedad o inquietud en la medida de lo posible
- Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar
- Evitar consumo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos y síntomas (p. ej. dolor) o agitación psíquica / emocional

Medición

- Seleccionar el brazo con PA más elevada, si lo hubiese
- Ajustar sin holgura y sin que comprima
- Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman
- El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arteria braquial
- El manguito debe quedar a la altura del corazón; pero no así el aparato, que debe ser bien visible para el explorador
- Seguir las instrucciones del fabricante
- De forma general, se requiere encender el esfigmomanómetro y proceder a la realización de la medida presionando el botón indicado para tal fin
- Esperar a finalizar la lectura y registrar la misma en la hoja apropiada.

Consejos para una toma de presión correcta:

1. Es importante efectuar la toma de manera correcta para obtener valores exactos.
2. Siéntese en la posición adecuada en una silla y ponga los brazos sobre la mesa.
3. Si la muñeca no se encuentra a la altura del corazón, no se obtendrá un valor correcto.
4. Relájese los hombros y el brazo, y efectúe la toma en una postura natural.
5. Es importante efectuar la toma en casa y anotar los valores obtenidos, cada día a la misma hora; así, se puede averiguar la tendencia de su presión.
6. Su médico diagnosticará los resultados, para aconsejarle en cuanto al cuidado de su salud.
7. Como la postura de toma y el grosor de los vasos sanguíneos son diferentes en la toma en la muñeca, el valor puede variar ligeramente con respecto a la toma en el brazo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.