

Corega Crema Extra Fuerte Adhesivo Prótesis Dental 75ml

CREMA FIJACIÓN EXTRA FUERTE PRÓTESIS DENTALES - 75 ML SABOR MENTA

Clasificación: Sin calificación

12,90 €

1,17 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [COREGA](#)


CREMA FIJACIÓN PRÓTESIS DENTALES COREGA EXTRA FUERTE - 75 ml SABOR MENTA

COREGA Extra Fuerte está formulado para proporcionar fijación todo el día y comodidad a las encías. Su sabor a menta proporciona un frescor inmediato cuando se coloca la prótesis dental sobre la encía.

MODO DE EMPLEO

Aplicación

1. Limpie y seque su prótesis dental.
2. Aplique una pequeña cantidad de fijador COREGA Extra Fuerte en bandas cortas, no demasiado cerca de los bordes de la prótesis dental (véanse los diagramas).
3. Enjuáguese la boca antes de colocarse la prótesis dental.
4. Coloque la prótesis dental en su sitio ejerciendo un poco de presión, sujétela firmemente y muerda durante unos segundos para fijarla.
5. Aplique una vez al día para una fijación segura. Si necesita aplicar más de una vez al día, consulte a su dentista.

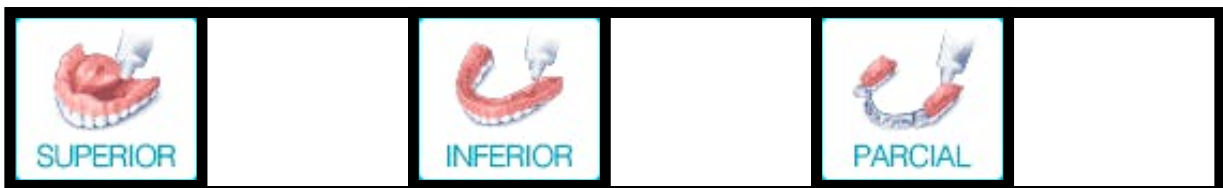

Eliminación

1. Enjuáguese la boca con agua.
2. Retire lentamente la prótesis dental con un movimiento de balanceo.
3. Retire los residuos de fijador de la prótesis dental con agua templada y un cepillo suave.

4. Utilice COREGA Limpiador para prótesis dentales para una limpieza en profundidad de su prótesis dental.

COMPOSICIÓN

Poly (Methylvinylether/maleic acid) sodium-calcium mixed partial salt, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum.
No contiene Zinc

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.