

HYLUPROTECT 10 ML

10 ML

Definición: Sin calificación

10,66 €

0,97 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [THEA](#)

Descripción

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

- Para humectar y lubricar el ojo.
- Para aliviar las sensaciones de sequedad y las irritaciones benignas ocasionadas por las agresiones del entorno, el cansancio, el trabajo prolongado frente a pantallas de vídeo o el uso de lentes de contacto, siempre que se trate de irritaciones no consideradas como patológicas.
- Puede utilizarse con lentes de contacto.

Contenido de 0,1% de hialuronato alta definición en una solución salina tamponada con fosfato y con polihexanida como conservante.

El hialuronato de sodio utilizado no es de origen animal (obtenido por fermentación).

El contenido del frasco se esteriliza por filtración.

Se garantiza su esterilidad siempre que el frasco no esté dañado.

Marcado CE ON: 0473

COMPOSICIÓN

Composición por ml:

1 mg de hialuronato de sódico de alta definición

0,0015 mg de polihexanida (PHMB)

0,1 mg de edetato de sódico

Tampón fosfato isotónico

Agua purificada

MODO DE EMPLEO

- Lave y seque cuidadosamente sus manos.
- Compruebe que el frasco está intacto para estar seguro de su esterilidad.
- Para abrir el frasco, gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj para romper el cierre de seguridad.
- Ponga el frasco boca abajo y vierta dos gotas en cada ojo cuidando no tocar el ojo con el frasco.

Este producto puede utilizarse con cualquier tipo de lentes de contacto.

Para adultos y niños.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No utilizar el frasco si está dañado.
No utilizar si el producto está turbio o decolorado.
No tocar el ojo con el frasco para evitar cualquier arañazo o infección del ojo.
No utilizar en caso de alergia a uno de los componentes.
No utilizar después de la fecha de caducidad.
No utilizar como tratamiento de estados patológicos.
En caso de aparición de problemas tras la utilización consulte a su médico.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Conservar a una temperatura inferior a 2-25°C.
Usar antes de 3 meses después de abrir el frasco.
No congelar.
No exponer a la luz (sol).
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservación del dispositivo: No sobrepasar la fecha límite de caducidad que aparece en el envase exterior.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.