

## ORLI OS6230 T.L/3 (30-34) CODE

CODERA CON ALMOHADILLAS EN GEL TALLA GRANDE - 30-34 cm

Clasificación: Sin calificación

12,50 €

1,14 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ORLIMAN S.L.U.](#)

### **CODERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS EN GEL TALLA GRANDE - 30-34 cm**

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo que evita rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo un mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadillas visco-elásticas que redistribuyen la compresión en el epicóndilo y la epitroclea e incluye cincha elástica para un ajuste individual, consiguiendo una tensión selectiva.

#### **EFFECTOS**

La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones. Las almohadillas redistribuyen la compresión del vendaje desde los epicóndilos prominentes hacia las partes blandas de su alrededor y ejercen un efecto masaje intermitente. En la zona del codo el tejido de punto es más suave evitando opresiones y compresiones no deseadas.

#### **INDICACIONES**

Epicondilitis (codo de tenista), Epitrocleitis (codo de golfista), tendinitis, ligeras contusiones, procesos inflamatorios, traumatismos e inestabilidades. Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

TALLAS	1	2	3
PERÍMETRO (cm)	22-26	26-30	30-34

#### **INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN**

**EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR SU TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.**

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario (en el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centímetros). Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

- Introduzca el brazo por la zona más ancha de la codera.
- Sitúela a nivel de la articulación del codo, colocando la almohadilla en la cara posterior de la articulación. Una compresión excesiva puede producir interrupciones de tipo vasco

#### **PRECAUCIONES**

El material constructivo es inflamable.

No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera despréndase rápidamente de ellos y utilice los medios adecuados para apagarlo. El material empleado es hipoalérgico, sin embargo no podemos garantizar al 100% que en determinados casos no puedan producirse alergias, si así fuera, retirar el producto y consultar con el médico prescriptor.

En caso de pequeñas molestias producidas por el sudor, recomendamos el uso de una interfase para separar la piel del contacto con el tejido. En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar el producto y acudir al médico o técnico ortopédico. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

## **RECOMENDACIONES - ADVERTENCIAS**

Estos productos solo deben ser utilizados por las personas que constan en la prescripción médica. No deben ser utilizados por personas ajenas a dicha prescripción. Cuando no use el producto, guárdelo en su envase original. Para el desecho del envase y el producto, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad.

El uso de las ortesis está condicionado a las recomendaciones del médico prescriptor, por tanto no debe ser utilizado para otros fines que los prescritos.

Para la validez de la garantía, el establecimiento expedidor debe cumplimentar la presente hoja de instrucciones.

## **FABRICACIÓN - CARACTERÍSTICAS**

Los materiales empleados en la fabricación han sido testados y homologados en todas sus características y cumplen los requisitos Europeos de calidad exigidos.

Todos los productos referidos, están elaborados con materiales de primera calidad y ofrecen un inmejorable confort y calidad de uso. Todos los productos ofrecen contención, estabilidad y com - presión para el tratamiento óptimo de las patologías para las cuales han sido diseñados.

## **RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO**

Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc. Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.