

ORLI TN-211 T.M/2 (36-41) RODI

RODILLERA CON FLEJES TALLA MEDIA - 36-41 cm

Prescripción: Sin calificación

12,50 €

1,14 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ORLIMAN S.L.U.](#)

Prescripción

RODILLERA ELÁSTICA CON FLEJES TALLA MEDIA - 36-41 cm

Línea elástica transpirable confeccionada en tejido elástico muy resistente y suave, lo que da a las prendas un mayor confort. Este tejido ofrece una compresión y una flexibilidad en 4 sentidos, lo que da a la ortesis una mejor adaptación.

EFFECTOS

- Estabilización
- compresión
- soporte.

INDICACIONES

Artritis y artrosis, soporte, apoyo y prevención en prácticas deportivas y laborales, ligeras contusiones, traumatismo e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

| TALLAS | 1 | 2 | 3 | LARGO |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| PERÍMETRO (cm) | 32-36 | 36-41 | 41-48 | 24 |

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR SU TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario (en el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centímetros). Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

- introduzca la rodillera por la zona más ancha de la misma
- sitúela a nivel de la articulación de la rodilla haciendo coincidir la almohadilla con la rótula, fijándose que los flejes queden paralelos entre sí coincidiendo con la línea media de la pierna. Una compresión excesiva puede producir interrupciones de tipo vascular.

- Colocar el producto en el segmento articular correspondiente, codo, tobillo, mano y rodilla de manera que queden alineadas o ajustadas a las secuencias del movimiento muscular. Ajustar los productos de forma que queden adaptadas a la configuración natural y no produzcan molestias o incomodidades en su porte.

PRECAUCIONES

El material constructivo es inflamable.

No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera despréndase rápidamente de ellos y utilice los medios adecuados para apagarlo. El material empleado es hipoalergénico, sin embargo no podemos garantizar al 100% que en determinados casos no puedan producirse alergias, si así fuera, retirar el producto y consultar con el médico prescriptor.

En caso de pequeñas molestias producidas por el sudor, recomendamos el uso de una interfase para separar la piel del contacto con el tejido. En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar el producto y acudir al médico o técnico ortopédico. Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

RECOMENDACIONES - ADVERTENCIAS

Estos productos solo deben ser utilizados por las personas que constan en la prescripción médica. No deben ser utilizados por personas ajenas a dicha prescripción. Cuando no use el producto, guárdelo en su envase original. Para el desecho del envase y el producto, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad.

El uso de las ortesis está condicionado a las recomendaciones del médico prescriptor, por tanto no debe ser utilizado para otros fines que los prescritos.

Para la validez de la garantía, el establecimiento expedidor debe cumplimentar la presente hoja de instrucciones.

FABRICACIÓN - CARACTERÍSTICAS

Los materiales empleados en la fabricación han sido testados y homologados en todas sus características y cumplen los requisitos Europeos de calidad exigidos.

Todos los productos referidos, están elaborados con materiales de primera calidad y ofrecen un inmejorable confort y calidad de uso. Todos los productos ofrecen contención, estabilidad y com - presión para el tratamiento óptimo de las patologías para las cuales han sido diseñados.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO

Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc. Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.